



بسمه تعالی

نام دستگاه : اکسیژن ساز
شماره اموال :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
معاونت درمان - مدیریت تجهیزات پزشکی
فرم نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان.....

روزهای ماه																								شاخص روزانه																			
روز ۳۱	روز ۳۰	روز ۲۹	روز ۲۸	روز ۲۷	روز ۲۶	روز ۲۵	روز ۲۴	روز ۲۳	روز ۲۲	روز ۲۱	روز ۲۰	روز ۱۹	روز ۱۸	روز ۱۷	روز ۱۶	روز ۱۵	روز ۱۴	روز ۱۳	روز ۱۲	روز ۱۱	روز ۱۰	روز ۹	روز ۸	روز ۷	روز ۶	روز ۵	روز ۴	روز ۳	روز ۲	روز ۱													
																																بررسی خلوص گاز اکسیژن در خروجی											
																																بررسی فشار گاز اکسیژن در خروجی											
																																بررسی عملکرد صحیح کمپرسور (عدم وجود نشتی، روغن ریزی، ارتعاش، نویز)											
																																بررسی کاتال خروجی هوا و دمای کمپرسور											
																																بررسی صحت عملکرد درایر (کنترل دمای هوای ورودی و خروجی)											
																																بررسی سنسور dew point درایر											
																																بررسی دمای محل نصب دستگاه (۱۰C الی ۲۵C)											
ماه سوم											ماه دوم					ماه اول								شاخص های هفتگی																			
توضیحات											توضیحات					توضیحات								هفته اول					هفته دوم					هفته سوم					هفته چهارم				
هفته اول											هفته دوم					هفته اول								هفته دوم					هفته سوم					هفته چهارم									
هفته دوم											هفته سوم					هفته اول								هفته دوم					هفته سوم					هفته چهارم									
هفته سوم											هفته چهارم					هفته اول								هفته دوم					هفته سوم					هفته چهارم									
هفته چهارم											هفته اول					هفته دوم								هفته سوم					هفته چهارم														
																								درستی عملکرد UPS و استابلایزر																			
ماه سوم											ماه دوم					ماه اول								شاخص های ماهانه																			
توضیحات											توضیحات					توضیحات								سالم					معیوب					توضیحات									
سالم											سالم					سالم								سالم					معیوب					توضیحات									
معیوب											معیوب					معیوب								معیوب					سالم					توضیحات									
توضیحات											توضیحات					توضیحات								توضیحات					توضیحات					توضیحات									
																								بررسی و تکمیل مستندات و اقدامات انجام یافته در خصوص تعویض فیلتر هوای کمپرسور، تعویض فیلتر روغن کمپرسور، تعویض فیلتر و واشر سپراتور کمپرسور، تعویض ترموستات کمپرسور و گیج های فشار (طبق توصیه سازنده)																			
																								شاخص های سالانه																			
یکسال											یکسال					یکسال								سالم					معیوب					توضیحات									
توضیحات											توضیحات					توضیحات								توضیحات					توضیحات					توضیحات									
																								بررسی و تکمیل مستندات و اقدامات انجام یافته در خصوص over haul کمپرسور، کالیبراسیون گیج های فشار، سرویس سوپاپ اطمینان مخازن، کالیبراسیون سنسور اکسیژن، تعویض فیلتر آنتی باکتریال گاز اکسیژن (طبق توصیه سازنده) و کنترل کیفی توسط شرکت های دارای مجوز																			